



til et
aktivt
liv

JOBST® FarrowWrap

Justerbare kompressionsløsninger
til egenbehandling af lymfødem

JOBST® FarrowWrap®

- Tilpasset et bedre liv

- Til din behandling
- Til din livstil
- Til din hverdag - både dag og nat





Hvordan finder du **den rette balance** mellem dine patienters **sundhed og livskvalitet?**

Behandling af kroniske sygdomme som lymfødem kræver en gennemtænkt strategi og et aktivt patientengagement. Hos Essity (tidligere BSN medical) ved vi, at slutmålet er at gøre det muligt for patienterne selv at behandle deres sygdom og påvirke deres behandling. Vi leverer meget justerbare behandlingsalternativer, som tilgodeser patienternes forskellige ønsker og behov, så det bliver lettere at leve med lymfødem.

Vores JOBST® FarrowWrap®-produkter er lette at tilpasse, hvilket gør det nemmere for patienten at sikre den rette behandling. Vi ved, at patienter ikke blot søger den bedste tilgængelige behandling, men også den behandling, der er bedst tilpasset til netop dem. Vores produktsortiment er udformet med omtanke for patienten, så du kan finde den behandling, der passer til hver enkelt patients livsstil og hverdag, uden at gå på kompromis med vedkommendes medicinske behov.

Flere valgmuligheder for dine patienter – **for et aktivt liv**

Hos Essity (tidligere BSN medical) hjælper vi sundhedspersonale med at finde den rette behandlingsløsning, som sikrer, at patienterne kan leve et mere selvstændigt, mere aktivt og raskere liv. Vi fokuserer også på at motivere patienterne til at fortsætte med behandlingen for at sikre de bedst mulige resultater.

Med lanceringen af produkterne i JOBST® FarrowWrap®-serien tager vi yderligere et skridt mod at kunne tilbyde et komplet produktsortiment, så du kan tilbyde dine patienter det, de ønsker: friheden til at kunne leve deres liv.



Hvad er JOBST® FarrowWrap®?

Sådan fungerer det

Hvordan skaber JOBST® FarrowWrap® kompression?

- Brug af specialmateriale.
- Smart, elastisk kortstræksmateriale i flere lag.
- Overlappende bånd nedefra og op.
- Bånd med optimal bredde.


Det er vigtigt, at hvert bånd i JOBST® FarrowWrap®-produktet kan appliceres med eller så tæt som muligt på maksimalt stræk. Et jævnt stræk over hele materialet bidrager til at sikre en graderet kompression.

Det elastiske kortstræksmateriale giver en jævn og kontinuerlig kompression ved hvile, samtidig med at det supplerer lægmuskulens pumpeeffekt, så der opnås et højt arbejdsstryk.

Fordele

- Det **brugervenlige velcrosystem giver en tidsbesparelse** for både sundhedspersonale og patient og letter desuden på- og aftagning - hvilket giver patienten maksimal selvstændighed.
- Fordi produktet kan tilpasses, kan variationer i ødemet nemt kontrolleres, endda af patienterne selv - de har med andre ord **mulighed for at behandle sig selv**.


Vi kan tilbyde et bredt udvalg af modeller og størrelser i standard eller målsyet, hvilket sikrer, at produktet passer under hele behandlingen og til alle individuelle behov.

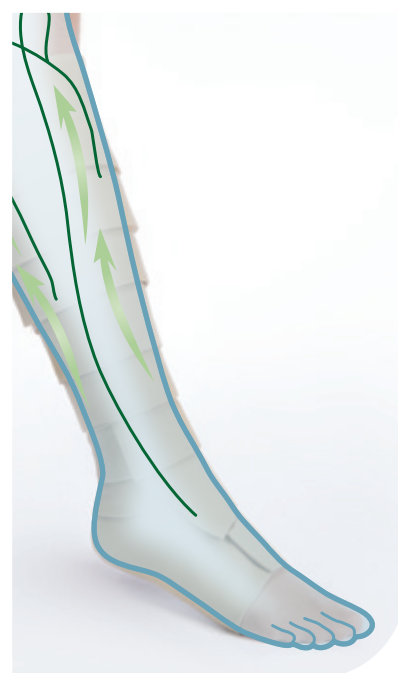


Kortstræksteknik

Egenskaber

- Gør det muligt at tilpasse kompressionsniveauet ved at strække båndene.
- Giver en uovertruffen forøgelse af kroppens naturlige muskelpumpeeffekt.
- Maksimerer lægmuskelfunktionen.
- Minimerer ødemet, når produktet anvendes.
- Giver øget kompression, når patienterne står eller er aktive, og mindre kompression, når de er inaktive.

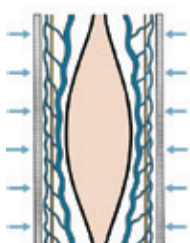

Det eksterne tryk, som opnås, når musklerne er i hvile, kaldes for hviletrykket.

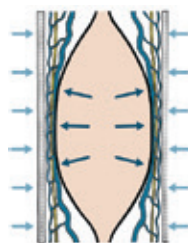

Arbejdstrykket virker, når musklerne arbejder, og kropsdelens diameter øges.

Kortstræksbind giver derfor et lavt hviletryk og et højt arbejdstryk, hvilket medfører en betydelig kompressionseffekt, når patienten er aktiv. Det gør kortstrækssystemer meget effektive ved behandling af lymfødem.

JOBST® FarrowWrap® - Forskellige varianter

JOBST® FarrowWrap® Lite

- Tilpasser sig efter kropsdelens form.
- Et godt valg for patienter med neuropati eller perifer karsygdom (PVD).
- Kan være den bedste løsning ved palliativ behandling eller til børn.
- Til milde og moderate ødemer.
- Kompression KKL 2.

JOBST® FarrowWrap® Strong

- Førsteklasses materiale med stabil kompression og en blød inderside.
- Kan håndtere mindre hudfolder.
- Til moderate til svære ødemer.
- Kompression KKL 3.

JOBST® FarrowWrap® Extra strong/"Classic"

- FarrowWrap®-originalmaterialet. Klinisk testet på tusindvis af patienter verden over.
- Slidstærkt, stift materiale, som føles behageligt mod huden. Modvirker at materialet ruller, og at produktet lægger sig ind i hudfolder.
- Det bedste valg til store hudfolder.
- Til moderate og svære ødemer.
- Et kraftigere og mere stift materiale end Strong.
- Anvendes ved ødemer med hudfolder.
- Kompression KKL 3.

JOBST® FarrowWrap® 4000

- Let at applicere med kun fire bånd.
- Anatomisk udformning, som forhindrer dannelse af lommer.
- Inderstrømpen letter påtagningen.
- Kompression KKL 3.

At behandle lymfødem kan være en udfordrende proces

Alle patienter er forskellige og har forskellige behov, og derfor bør du overveje at anvende forskellige behandlingsløsninger.



Sundhedspersonalet lægger bindet på

Til ødemreduktion anvendes oftest kompressionsbind af kortstrækstypen, som appliceres af uddannet sundhedspersonale. Kompressionen appliceres i flere lag. Fordele: Trykket kan varieres og ødemet reduceres før næste trin i ødembehandlingen.

Konklusion:

Kan din patient selv lægge kompressionsbindet på, eller kommer du hver dag for at hjælpe patienten med at gøre det? I så fald kan applicering af et kompressionsbind være den bedste løsning.

FarrowWrap kan være den bedste løsning for patienter, som ikke selv kan lægge bindet på, eller som ikke har mulighed for at få bindet lagt om ofte af sundhedspersonalet



Fladstrikkede strømper

Det mest praktiske alternativ, som også er det, der passer bedst under patientens tøj, fordi det har færre lag end en bandage eller et kompressionsbind. JOBST® Elvarex® fladstrikkede strømper fås med individuelt tilpassede løsninger og fungerer til over- og underekstremiteterne.

Konklusion:

Er der behov for et produkt med mange tilpasningsmuligheder, eller har ødemet stabiliseret sig? I så fald kan den bedste løsning være at tilbyde en JOBST® Elvarex® fladstrikket kompressionsstrømpe.

Find den bedste løsning til din patient

Der findes en række kompressionsløsninger, som kan begrænse forekomsten af hævelser. Kompressionsbind og kompressionsstrømper anses ofte for at være førstevalget, men de fungerer ikke for alle patienter.



JOBST® FarrowWrap®

Justerbare kompressionsprodukter kan være et alternativ specielt til patienter med varierende ødem, samt ved problemer med på- og afgang. Også velegnet til patienter med begrænsede muligheder for at blive bandageret af sundhedspersonalet. De overlappende bånd giver støtte og stabilitet, som kontrollerer ødemet. Det brugervenlige produkt gør patienten mere selvstændig, fordi vedkommende selv kan tage produktet af og på.

Konklusion:

Har din patient et ødem, som varierer, eller kan vedkommende ikke selv bandagere sig eller tage en strømpe på?

I så fald kan JOBST® FarrowWrap® være den bedste løsning til din patient.



Overekstremitet

JOBST® FarrowWrap® – egnet til brug døgnet rundt



JOBST® FarrowWrap® Lite RTW arm

LITE RTW ARM er en effektiv, anatomisk udformet løsning til kontrol af ødemer på overekstremiteten. Kompressionsproduktet har en fastsyet inderarmstrømpe og kan nemt tages af og på med én hånd. Det er beregnet til kontrol af milde til moderate ødemer. Produktet er let og er behageligt at have på, fordi det kun består af ét lag, men det har samtidig kortstræksegenskaber. Maskinvaskes. Kompression: KKL 2.



JOBST® FarrowWrap® Lite specialsyet arm

LITE Målsyet arm består af overlappende bånd af kortstræksmateriale. Det kræver to hænder at tage produktet på. Kortstræksbånd gør, at produktet kan appliceres med maksimalt stræk. Maskinvaskes. Kompression: KKL 2.



JOBST® FarrowWrap® Extra strong/“Classic” specialsyet arm

EXTRA STRONG Arm er beregnet til sværere ødemer, som kræver høje kompressionsniveauer. Produktet fås kun som målsyet, og det kræver to hænder at tage det på. Patienter med meget store arme eller moderate til alvorlige hævelser har gavn af EXTRA STRONG-materialet. Håndvaskes. Kompression: KKL 3.



JOBST® FarrowWrap® Strong specialsyet arm

STRONG Arm anvendes i samme situationer, men materialet har ikke så meget stivhed som EXTRA STRONG. Maskinvaskes. Kompression: KKL 3.



JOBST® FarrowWrap® Lite Håndddel KKL 2

JOBST® FarrowWrap® LITE Håndddel er ambidekstral (kan anvendes på begge hænder) og leveres med 4 mm og 8 mm Velcro®-pelotte. Egnede til milde til moderate ødemer.

Fordele, som giver din patient større frihed til at nyde livet:

1. Pelotten bidrager til at reducere ødemer, som kan opstå på håndryggen.
2. Kan anvendes på begge hænder.
3. Slidstærk og behagelig at have på.



JOBST® FarrowWrap® Glove

Holdbar og latexfri handske til patienter med let til moderat ødem.

- Findes i 8 str. i KKL 1 og 2.
- Kan klippes til i fingerlængden uden af trævle.

Inderstrømpe



Inderstrømpen er kun nødvendig til målsyede armstrømper.

Den fås som en tynd, rundstrikket strømpe eller en mere beskyttende frottéstrømpe.

Der er ikke kompression i inderstrømperne.

Underekstremitet

JOBST® FarrowWrap® Lår - egnet til brug døgnet rundt

JOBST® FarrowWrap® Lite

Beregnet til kontrol af milde til moderate ødemer. Produktet fås i versionerne standard og målsyet. LITE-materialet kan maskinvaskes*. Kompression: KKL 2.



Lite Lår

JOBST® FarrowWrap® Strong

Beregnet til moderate til svære ødemer og fås i versionerne standard og målsyet. STRONG-materialet kan maskinvaskes*. Kompression: KKL 3.



Strong Lår

JOBST® FarrowWrap® Extra strong/ "Classic"

Beregnet til kontrol af moderate til svære ødemer og forhindrer, at huden folder. Produktet er kendt som "JOBST® FarrowWrap® - original". Fås i versionerne standard og målsyet. Håndvaskes*. Kompression: KKL 3.



Extra strong/"Classic" Lår



Lite Knædel



Strong Knædel



Lite Underben



Strong Underben



Strong Underben

*Følg plejeanvisningerne i produktemballagen.

Fod

JOBST® FarrowWrap® fod – egnet til brug døgnet rundt



JOBST® FarrowWrap® Lite Foddel

LITE Foddel giver kompression af milde til moderate ødemer. Fås i versionerne standard og målsyet. Kompression: KKL 2.



JOBST® FarrowWrap® Strong Foddel

STRONG Foddel giver kompression af milde til moderate ødemer. De lange ankelbånd kan lægges rundt om anklen eller over forfoden for at give øget kompression efter behov. Fås i versionerne standard og målsyet. Kompression: KKL 3.



JOBST® FarrowWrap® Extra strong/“Classic” Foddel

CLASSIC Foddel er klinisk testet til behandling af ødem. Solid konstruktion beregnet til moderate til svære ødemer. Fås i versionerne standard og målsyet. Kompression: KKL 3.



JOBST® FarrowWrap® Tåkappe

Slidstærk og behagelig – tyndt og blødt materiale med glatte sømme

- Kan anvendes til både højre og venstre fod.
- KKL1 og 2 og i 4 størrelser XS, S, M, L.
- Kan klippes til.



JOBST® FarrowHybrid ADI

Knæstrømpe med kompression i foden. Findes som ADI og ADII i størrelse S, M, L og XL. Kompression: KKL 2.

Underben

JOBST® FarrowWrap® Underben - egnet til brug døgnet rundt



JOBST® FarrowWrap® 4000

Underbensdel beregnet til moderate til svære ødemer. Fastsyet inderstrømpe og justerbare bånd gør produktet let at tage på. Standardmodel. Kan maskinvaskes*. Kompression: KKL 3.

Inderstrømpe



JOBST® FarrowWrap® TG Soft

Inderstrømpe til Farrowwrap lår, knædel og underben. Følger automatisk med og kan bestilles separat.

Produktsortiment

	Foddel	Underben	Strømpe med kompression i fod og ankel	Knædel	Lår	Arm	Hånddel med pelotteindlæg
KKL2 Mildt til moderat 20-30 mmHg							
JOBST® FarrowWrap® LITE	RTW, CM	RTW, CM		RTW	RTW, CM	RTW, CM	RTW
JOBST® FarrowHybrid™ ADI			RTW				
KKL3 Moderat til kraftigt 30-40 mmHg							
JOBST® FarrowWrap® STRONG	RTW, CM	RTW, CM		RTW	RTW, CM	CM	
JOBST® FarrowWrap® EXTRA STRONG/"CLASSIC"	RTW, CM	RTW, CM			RTW, CM	CM	
JOBST® FarrowWrap® 4000		RTW					
JOBST® FarrowHybrid™ ADII			RTW				


RTW: Ready-To-Wear/Standard • CM: Custom Made/specialsyet

	Handske	Tåkappe
KKL1 Let 15-20 mmHg		
JOBST® FarrowWrap® Glove, KKL1	RTW	
JOBST® FarrowWrap® Tåkappe, KKL1		RTW
KKL2 Mildt til moderat 20-30 mmHg		
JOBST® FarrowWrap® Glove, KKL 2	RTW	
JOBST® FarrowWrap® Tåkappe, KKL 2		RTW

FarrowWrap®


Måleskema - Arm og Hånd

FarrowWrap® Lite - arm og hånd

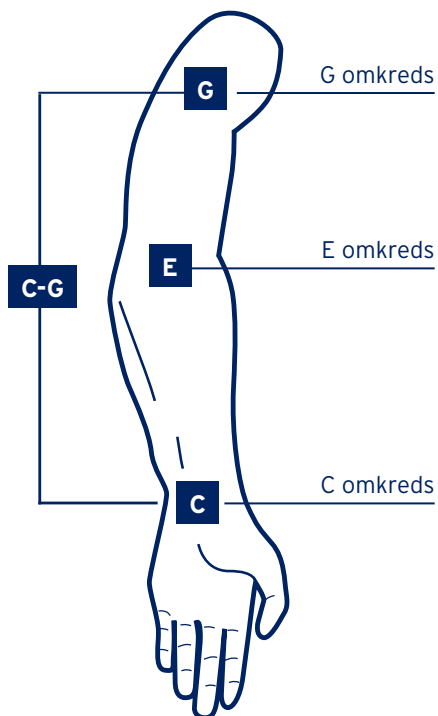

Måleskema - Arm

	Small	Medium	Large
Omkreds (G)	22-31 cm	29-39 cm	32-45 cm
Omkreds (E)	20-27 cm	25-34 cm	30-40 cm
Omkreds (C)	14-18 cm	16-21 cm	19-25 cm
Længde - Kort (C-G)	40-43 cm		
Længde - Normal (C-G)	44-47 cm		
Længde - Lang (C-G)	48-51 cm		

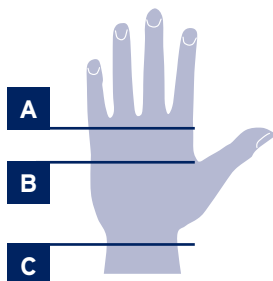


Måleskema - Hånddel

	X-Small	Small	Medium	Large
LITE handske, ambidekstral (kan anvendes på begge hænder)				
cA	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm
cB	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-26 cm
cC	15-18 cm	17-20 cm	19-22 cm	22-24 cm

FarrowWrap®

Måleskema - Glove

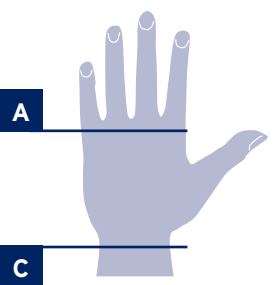

Måleskema - Glove

Størrelse	1	2	3	4	5	6	7	8
Omkreds (A)	16,6-18 cm	16,6-18 cm	18-19,5 cm	18-19,5 cm	18-19,5 cm	19,5-21,5 cm	19,5-21,5 cm	21,5-23,1 cm
Omkreds (C)	15,6-16,7 cm	16,7-18,1 cm	15,9-17 cm	17-18,5 cm	18,5-20,4 cm	17,2-18,7 cm	18,7-20,6 cm	18,3-20,1 cm

FarrowWrap®

Måleskema - Ben



Ready to wear	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Lår						
Lyske (G)	60-70 cm	65-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	85-100 cm	95-110 cm
Over knæet (E)	47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm	81-87 cm
Kort (E-G)	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm	16-20 cm
Normal (E-G)	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm	21-26 cm
Lang (E-G)	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm	27-31 cm
Underben						
Midt på læggen (C)	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm	
Ankel (B)	21-25 cm	25-30 cm	30-36 cm	36-42 cm	42-50 cm	
Normal (A-D)	33-37 cm	35-39 cm	37-41 cm	39-43 cm	39-43 cm	
Lang (A-D)	38-41 cm	40-43 cm	42-45 cm	44-47 cm	44-47 cm	
Foddel						
Midt på foden (A)	22-24 cm	25-27 cm	28-30 cm	31-34 cm	35-40 cm	
Normal (X)	16-17 cm	17-18 cm	19-20 cm	20-21 cm	22-23 cm	
Lang (X)	18-19 cm	19-20 cm	21-22 cm	22-23 cm	24-25 cm	
Tilbehør innerstrumpa TG Soft. Leveres i par. (indgår i lår)						
Omkreds - TG® Soft		< 40 cm	40-70 cm	70 - 120 cm		
Tilbehør Farrow Hybrid						
Skostørrelse		35-38	38-41	41-44	44-46	
Omkreds - Standard fod (A¹)		20-27	20-27	20-27	20-27	
Omkreds - Bred fod (A¹)		28-35	28-35	28-35	28-35	

*kun i STRONG

Understrømpe, Farrow Liner. Indgår till Underben


(Par)	Normal	Bred
Bredeste omkreds	15-58 cm	52-71 cm

Understrømpe, TG Soft. Ingår till Lår

(Par)	Small	Medium	Large
Bredeste omkreds	15-40 cm	40-70 cm	70-120 cm

FarrowWrap®

Måleskema - Tåkappe

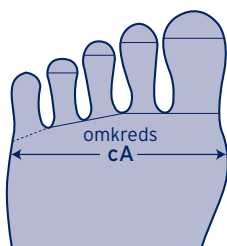

	X-Small	Small	Medium	Large
Størrelse	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm



JOBST® FarrowWrap®

Måleskema - Standard armstrømpe

Navn:

Adresse:

Post nr + by:

Tlf:

Dato:

Kommentarer:

Længde (cm)

Omkreds (cm)

C - G

G Venstre:

Højre:

Venstre:


Højre:

E Venstre:

Højre:

C Venstre:

Højre:

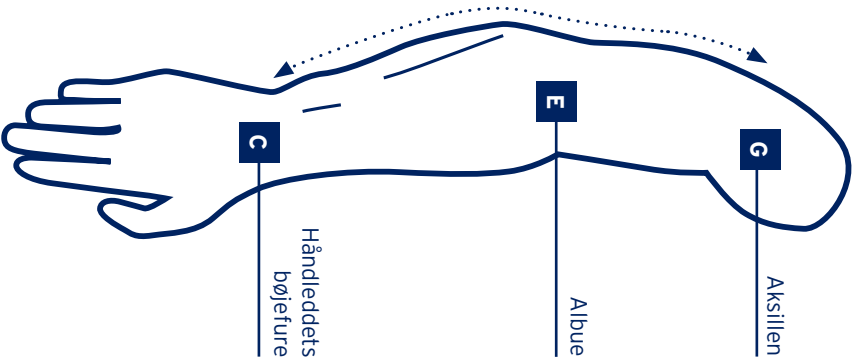

OBS!
Mål længden (cm) på ydersiden af armen, fra håndled til aksil (G) med let bøjet arm.

	Small	Medium	Large
Omkreds - Aksillen (G)	22-31 cm	29-39 cm	32-45 cm
Omkreds - Albue (E)	20-27 cm	25-34 cm	30-40 cm
Omkreds - Håndledets bøjefure (C)	14-18 cm	16-21 cm	19-25 cm
Længde - Kort (C-G)	40-43 cm		
Længde - Normal (C-G)	44-47 cm		
Længde - Lang (C-G)	48-51 cm		

	STØRRELSE	LÆNGDE	ART NR. BEIGE	ART NR. SORT
VENSTRE	Small	Kort	76650-11	76650-29
	Small	Normal	76650-05	76650-23
	Small	Lang	76650-35	76650-13
	Medium	Kort	76650-13	76650-31
	Medium	Normal	76650-07	76650-25
	Medium	Lang	76650-01	76650-19
	Large	Kort	76650-15	76650-33
	Large	Normal	76650-09	76650-27
	Large	Lang	76650-03	76650-21
	Small	Kort	76650-12	76650-30
HØJRE	Small	Normal	76650-06	76650-24
	Small	Lang	76650-00	76650-18
	Medium	Kort	76650-14	76650-32
	Medium	Normal	76650-08	76650-26
	Medium	Lang	76650-02	76650-20
	Large	Kort	76650-16	76650-34
	Large	Normal	76650-10	76650-28
	Large	Lang	76650-04	76650-22



JOBST® FarrowWrap®

Måleskema - Specialsyet armstrømpe

Kommentarer

Patient

Navn: _____

Adresse: _____

Post nr + by: _____

Tlf: _____

Dato: _____

Måltager

Navn: _____

Arbejdssted: _____ Afd: _____

Adresse: _____

Post nr + by: _____

Tlf: _____ E-mail: _____

Faktureres

Rekv nr: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Post nr + by: _____

Sendes til: ☐ Patient ☐ Måltager

Omfang i centimeter (cm)

C - G

Venstre:

Højre:

OBS!

Mål længden (cm) på ydersiden af armen, fra håndled til aksillen (G) med let bøjet arm.

G Venstre: Højre:

F1 Venstre: Højre:

F Venstre: Højre:

E Venstre: Højre:

C - E

Venstre:

Højre:


OBS!

Mål længden på ydersiden af armen, fra håndled (C) til albuen (E)

D1 Venstre: Højre:

D Venstre: Højre:

C Venstre: Højre:

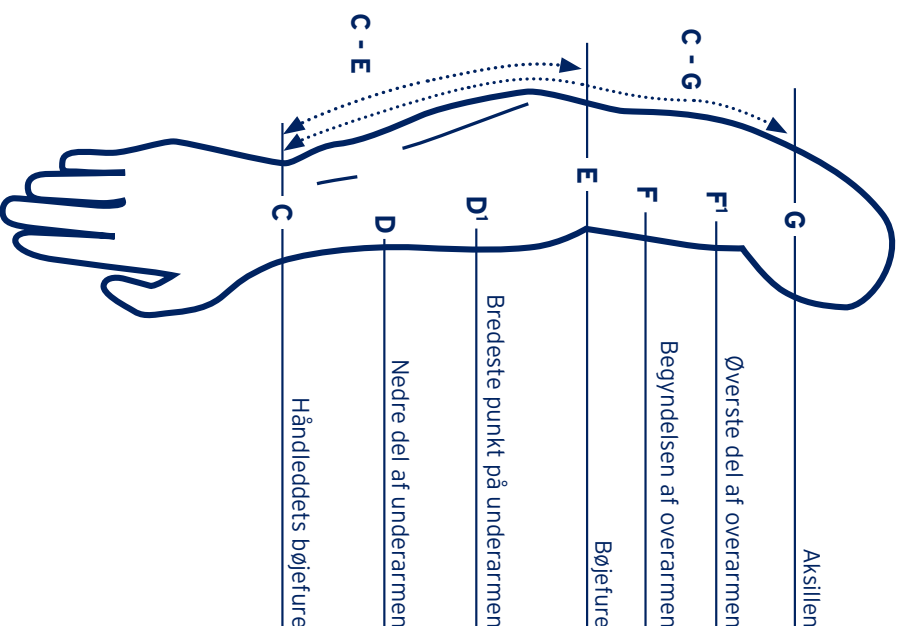

Specialsyet armstrømpe

Kompression:

☐ Lite (KKL 2)

☐ Strong (KKL 3)

☐ Extra Strong "CLASSIC" (KKL 3)

Farve:

☒ Beige

Antal:

Venstre Højre

Valg af inderstrømpe:

Specialsyet armstrømpe leveres med en inderstrømpe uden ekstra omkostning. Noter valg af størrelse på inderstrømpen herunder. Mål omfang på Ft.

☐ TG Soft small (<40cm)

☐ TG Soft medium (40-70cm)

Antal ekstra inderstrømper

Obs! ekstra inderstrømper er ikke inkluderet i prisen.

Antal Størrelse



JOBST® FarrowWrap®

Måleskema - Specialsyet benstrømpe

Kommentarer

Patient

Navn: _____

Adresse: _____

Post nr + by: _____

Tlf: _____

Dato: _____

Måltager

Navn: _____

Arbejdssted: _____

Adresse: _____

Post nr + by: _____

Tlf: _____

Faktureres

Rekv nr: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Post nr + by: _____

Sendes til: ☐ Patient ☐ Måltager

Længde i centimeter (cm)

Lår

E - G

Venstre:

Højre:

Lyske

G _____ Øvre lår

E _____ Over patella

Underben

A - D

Venstre:

Højre:

2 fingre under folden i knæhasen

Bredeste del af lægmusklen

Midt i mellem B² & C

Basen af lægmusklen

Smalleste del af anklen

Midt på foden

OBS!
Ved A-D, mål bagpå benet
følg benets kontur.
Ved E-G, mål medialt på
benet, følg benets.

a = Gulv



Lige afstand, måles lateral fra hæl til lilletåens grundled.

Omfang i centimeter (cm)

Lår

G Venstre: Højre:

F Venstre: Højre:

E Venstre: Højre:

Underben

Venstre: Højre:

C Venstre: Højre:

B² Venstre: Højre:

B¹ Venstre: Højre:

B Venstre: Højre:

Fod

B Venstre: Højre:

A¹ Venstre: Højre:

X Venstre: Højre:

SPECIALSYET BENSTRØMPE

Kompression:

☐ LITE (KKL 2)

☐ STRONG (KKL 3)

☐ EXTRA STRONG "CLASSIC" (KKL 3)

Farve:

☒ Beige

Antal:

Lår: Venstre Højre

Underben: Venstre Højre

Fod: Venstre Højre

Valg af inderstrømpe:

Når en foddel og bendel købes sammen, indgår et par inderstrømper uden omkostning. Noter valg af størrelse på inderstrømpen herunder. Mål på læggens bredeste del.

☐ TG Soft small (Omkreds 15-40cm)

☐ TG Soft medium (Omkreds 40-70cm)

☐ TG Soft large (Omkreds 70-100cm)

Antal ekstra inderstrømper:

Obs! Ved bestilling af ekstra inderstrømper tillægges en omkostning for disse.


TG Soft

Small Medium Large



Det rette produkt hver gang til dig og dine lymfødempatienter

Essity fokuserer på integrerede behandlingsløsninger. Ved at føje produktserien JOBST® FarrowWrap® til JOBST®-sortimentet udvider vi vores udvalg af innovative produkter med henblik på at opfylde såvel patienternes som det medicinske behov i alle behandlingsstadier. JOBST® FarrowWrap® har mange anvendelsesområder, er let at bruge og er et alternativ i behandlingen af lymfødempatienter.

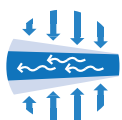

Ødemreduktion

		LATENT Stadie 0	MILDT Stadie 1	MODERAT Stadie 2	SVÆRT Stadie 3
Kompressionsprodukter	Justerbare kompression		JOBST® FarrowWrap® Lite		
			JOBST® FarrowWrap® Strong		
			JOBST® FarrowWrap® 4000		
	Bind			JOBST® FarrowWrap® Extra strong/"Classic"	
				JOBST® Compri2	
				Comprilan®	
Hud- og sårbehandling					Cutimed® Siltec®
					Cutimed® Sorbion®



Efter reduktion

		LATENT Stadie 0	MILDT Stadie 1	MODERAT Stadie 2	SVÆRT Stadie 3
Kompressionsprodukter	Fladstrikkede produkter		JOBST® Elvarex®		
			JOBST® Elvarex® Plus		
			JOBST® Elvarex® Soft		
			JOBST® Elvarex® Soft Seamless		
	Rundstrikkeprodukter			JOBST® Bellavar®	
			JOBST® Bella™ Lite		
			JOBST® Bella™ Strong		
	Justerbare produkter		JOBST® FarrowWrap® LITE		
			JOBST® FarrowWrap® STRONG		
			JOBST® FarrowWrap® 4000		
				JOBST® FarrowWrap® Extra strong/"CLASSIC"	



essity

JOBST®,
an Essity brand

4102_0823

Essity Denmark A/S
Gydevang 33,
DK-3450 Allerød

www.jobstonline.dk
Tlf: 4816 8220
jobst.dk@essity.com