



Comfiwave[®]

Kompressionsbandage
til nat og hvile

Hvad er *Comfiwave*®?

Comfiwave er en patenteret kompressionsbandage, der er designet til at supplere det kompressionsprodukt, en patient bruger i dagtimerne.

Comfiwave giver et kompressionstryk på **15-21 mmHg**.

Nem på- og aftagning gør Comfiwave til en brugbar løsning, da den giver kompression om natten og er behagelig til afslapning om dagen.



Knælang

Side 10 ►



Lyskelang

Side 12 ►



Tåkappe

Side 14 ►



Armstrømpe

Side 16 ►



**Armstrømpe
med hånddel**

Side 18 ►



Handske

Side 20 ►



**Lang handske
med fingre**

Side 22 ►



**Arm/handske
med fingre**

Side 24 ►



Mavebånd

Side 26 ►



Brystbånd

Side 28 ►



Halsbandage

Side 30 ►



Til brug om natten

Kronisk ødem går jo ikke i sig selv i løbet af natten og kompressionsbandager lavet til dagsbrug er ikke optimale at sove med. Fortsæt på behageligeste vis kompressionbehandlingen om natten med Comfiwaves bløde og åndbare stof, der giver skånsom kompression, mens du sover.



Til når som helst

Comfiwave-bandager er produceret med patenteret højelastisk garn, hvilket gør dem nemme at tage af og på. -altså perfekt til afslapning i løbet af dagen.

Stoffets åndbarhed betyder, at Comfiwave er egnet til brug året rundt, da den er køligere at have på end traditionelle kompressionsprodukter.

Ud-i-et-strikketeknologi

Nemt farvekoordineret størrelsesskema

f. eks.




= Large, LANG

Comfiwave's unikke strikning
i bæk og bølge masserer
ødemet og efterlader det med
afmærkninger, hvilket blødgør
vævet.

Comfiwave til underekstremiteterne er
produceret med en høj grad af stabilitet
i ankelområdet. Den er tilpasset ankels
anatomiske for at hindre, at den generer
henover anklen.

Det laterale og mediale tåområde er
strikket, så det kan strækkes mere,
hvilket kan forhindre tryksår.

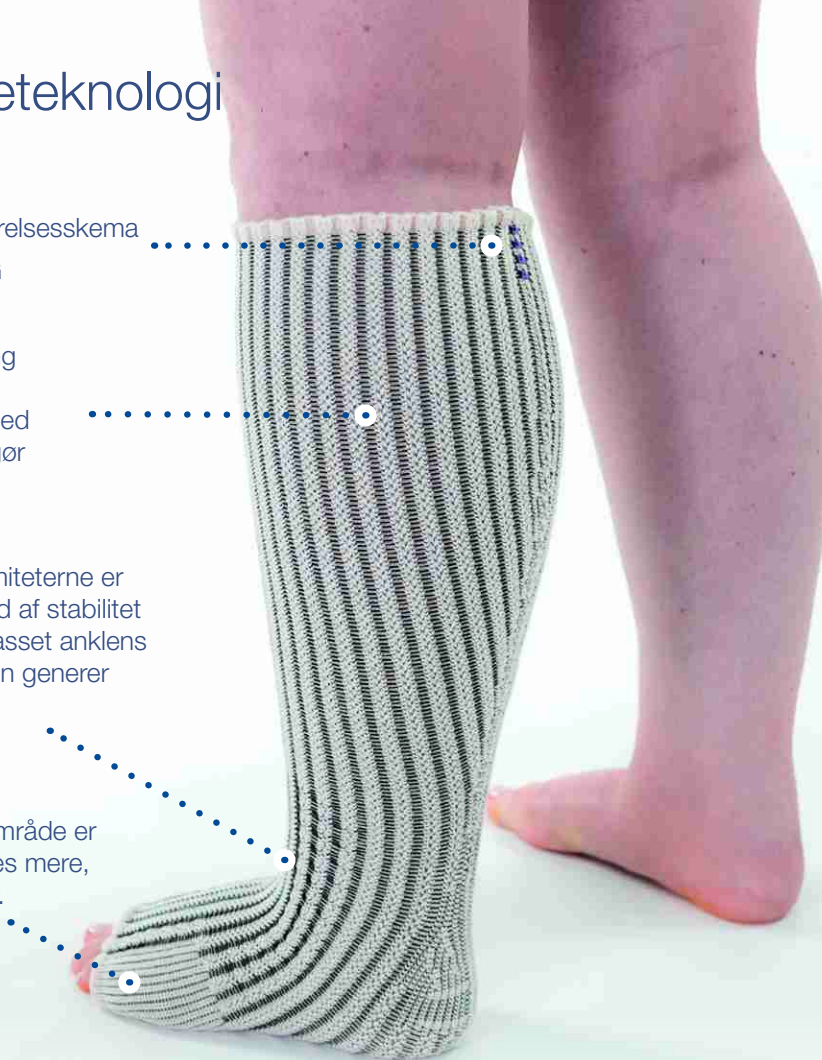

Comfiwave® fakta



Nem at tage af og på

Patenteret strik med høj elasticitet gør det nemt at tage Comfiwave på og af.



Fremstillet af blød, ufarvet bomuld

Bomuld mod huden og et sømløst design sikrer maksimal komfort.



Åndbart materiale

Comfiwaves bølgemønster sikrer høj luftgennemstrømning, som virker kølende og giver stræk.

Comfiwave[®] funktioner



Giver effektiv kompression om natten

Supplerer den kompressionsbehandling, patienten får i dagtimerne



Kan anvendes til palliativ behandling



Kan anvendes under easywrap eller bandage



Jeg er vild med denne bandage. Jeg har haft den på om natten i den sidste uge og det har gjort en enorm forskel!

- Patient med lymfødem

Virkelig behagelig at have på om natten. I modsætning til andre produkter gør den ikke mit ben varmt ved høje temperaturer. Nem at tage af og på. Fremragende produkt

- Patient med lymfødem

“ Brugere fortæller, at Comfiwave er behagelig og nem at bruge, hvilket i sig selv vil forbedrer compliance og selvkontrol af ødemet. ”

“ ...denne type produkt kan bruges alene eller som supplement til andre kompressionsprodukter og døgnet rundt om nødvendigt. ”

Download
kliniske casestudies
og artikel

www.comfiwave.info

British Journal of
Community Nursing

PRODUCT FOCUS

Circumference (cm)	A	C	D	F	G	Limb volume A	Unaffected	% difference
Baseline	17.5	17.5	25	29	31.5	2329	1954	+19%
After 2 weeks	17	15.8	24	27.5	31	2139	1953	-8%



through her teenage years with bilateral lower leg oedema and recurrent episodes of cellulitis.

On initial assessment, there was evidence of bilateral lymphoedema below the knee, with both feet showing positive Stemmer's sign, mild hyperkeratosis and post-cellulitis skin discoloration on the left gaiter site. The left leg was 30% bigger than the right, with an ankle circumference of 51 cm and calf of 46 cm. There were distinct skin folds distorting the shape around her left ankle, as well as foot oedema, which was restricting footwear (Figure 4). The limb size also restricted clothing, and the patient was only able to wear very loose trousers or long skirts.

Initial advice of skin care, exercise, elevation and weight management were discussed, and 2 weeks of daily treatment were booked. Miss H was signed off work by her GP to enable her to attend the sessions. Daily treatment commenced in October 2018 and involved alternating days of MLD or intermittent compression using Haddadum



Figure 5. Miss H wearing Comfiwave on the left leg

Comfiwave under Easycap for 2 weeks to compare this with the previous Mobilider/Easycap combination (Figure 6).

The feedback after 2 weeks was that it was a much more comfortable garment combination than the previous one.



Figure 6. Miss H's legs after using Comfiwave for 2 weeks

PRODUCT FOCUS

within wave devices' to the y were improve sent of hat this rent or as 24 hours efficacy in decreasing edema and lent, family


ent: a prospective 5-841. <https://doi.org/10.1016/j.jnmb.2017.04.001>

nt sleep well using Comms Numb 2017; ntaker J Examination in tissue regeneration 429-435. <https://doi.org/10.1016/j.jnmb.2017.04.001>



Comfiwave® Knælang

	KORT		NORMAL		LANG
S	CW1-AD2S	■	CW1-AD2R	■	CW1-AD2L
M	CW1-AD3S	■	CW1-AD3R	■	CW1-AD3L
L	CW1-AD4S	■	CW1-AD4R	■	CW1-AD4L
XL	CW1-AD5S	■	CW1-AD5R	■	CW1-AD5L

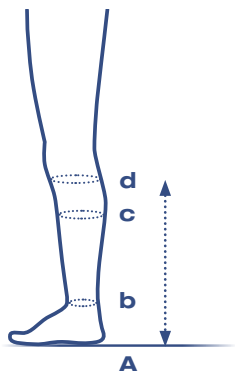

Omkreds cm

S

M

L

XL

c BREDESTE
PUNKT PÅ LÆG

25 - 32

30 - 38

36 - 46

44 - 56

b ANKEL

17 - 22

20 - 26

22 - 30

27 - 35

Længder cm

KORT

NORMAL

LANG

A-d KNÆSTRØMPE

32 - 37

37 - 42

42 - 48



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg




A-d
Gulv til 2 fingerbredder
under knæhasen



Comfiwave® Lyskelang

	KORT		NORMAL		LANG
S	CW1-AG2S	■	CW1-AG2R	■	CW1-AG2L
M	CW1-AG3S	■	CW1-AG3R	■	CW1-AG3L
L	CW1-AG4S	■	CW1-AG4R	■	CW1-AG4L
XL	CW1-AG5S	■	CW1-AG5R	■	CW1-AG5L
XXL	CW1-AG6S	■	CW1-AG6R	■	CW1-AG6L

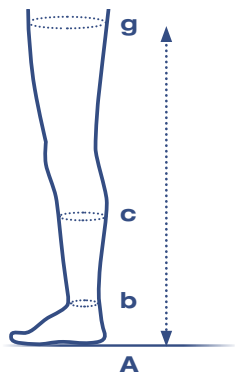

Omkreds cm

S

M

L

XL

XXL

g TOPPEN AF
LÅRET

40 - 48

46 - 56

54 - 65

62 - 75

72 - 92

c BREDESTE
PUNKT PÅ LÆG

25 - 32

30 - 38

36 - 46

44 - 56

52 - 64

b ANKEL

17 - 22

20 - 26

22 - 30

27 - 35

27 - 35

Længder cm

KORT

NORMAL

LANG

A-g LYSKESTRØMPE

64 - 70

70 - 77

77 - 84



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg



g
Toppen af låret



A-g
Gulv til toppen
af låret



Comfiwave® Tåkappe

NORMAL

M

CW1-ZA3



L

CW1-ZA4





Omkreds cm

a FORFOD

M

20 - 27

L

26 - 34



a
Forfod



Comfiwave® Armstrømpe

KORT

NORMAL

S

CW1-CG2S



CW1-CG2R



M

CW1-CG3S



CW1-CG3R




L

CW1-CG4S



CW1-CG4R



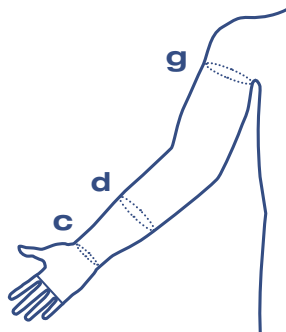

Omkreds cm

S

M

L

g ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c HÅNDELED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

Længde cm

KORT

NORMAL

c-g ARMSTRØMPE

36 - 42

40 - 46



c
Håndled




d
Midt på
underarmen



g
Øverst på
overarmen



c-g
Håndled til
armhulen

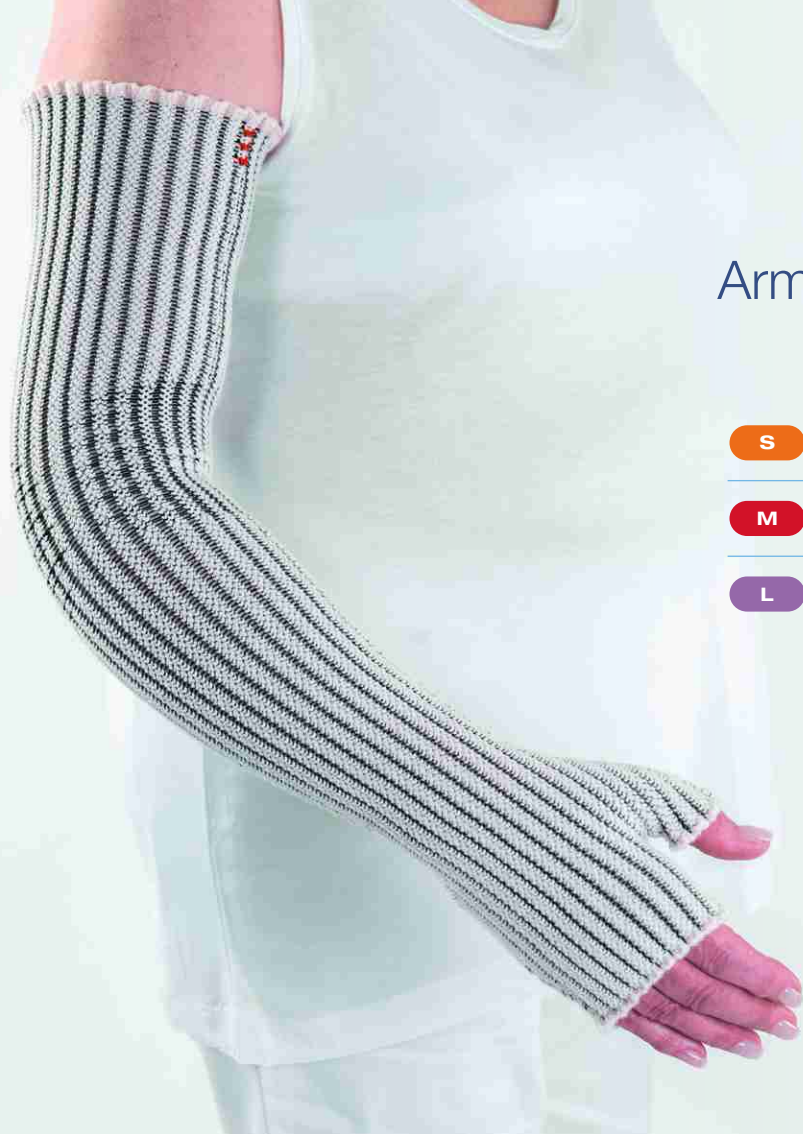

Comfiwave®

Armstrømpe med hånddel

KORT

NORMAL

S

CW1-AH2S

CW1-AH2R

M


CW1-AH3S

CW1-AH3R

L

CW1-AH4S

CW1-AH4R

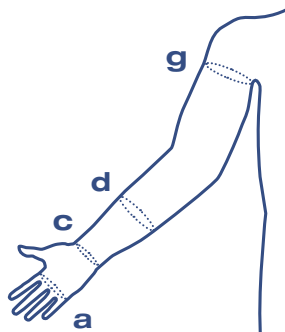

Omkreds cm

S

M

L

g ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c HÅNDLED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

a HÅNDFLADEN VED BUNDEN AF FINGRENE

16 - 22

18 - 24

20 - 26

Længde cm

KORT

NORMAL

c-g

ARMSTRØMPE MED
HÅNDEL

36 - 42

40 - 46



a

Omkreds af hånd
ved fingrenes
grundled



c

Håndled



d

Midt på
underarmen




g

Øverst på
overarmen



c-g

Håndled til armhule

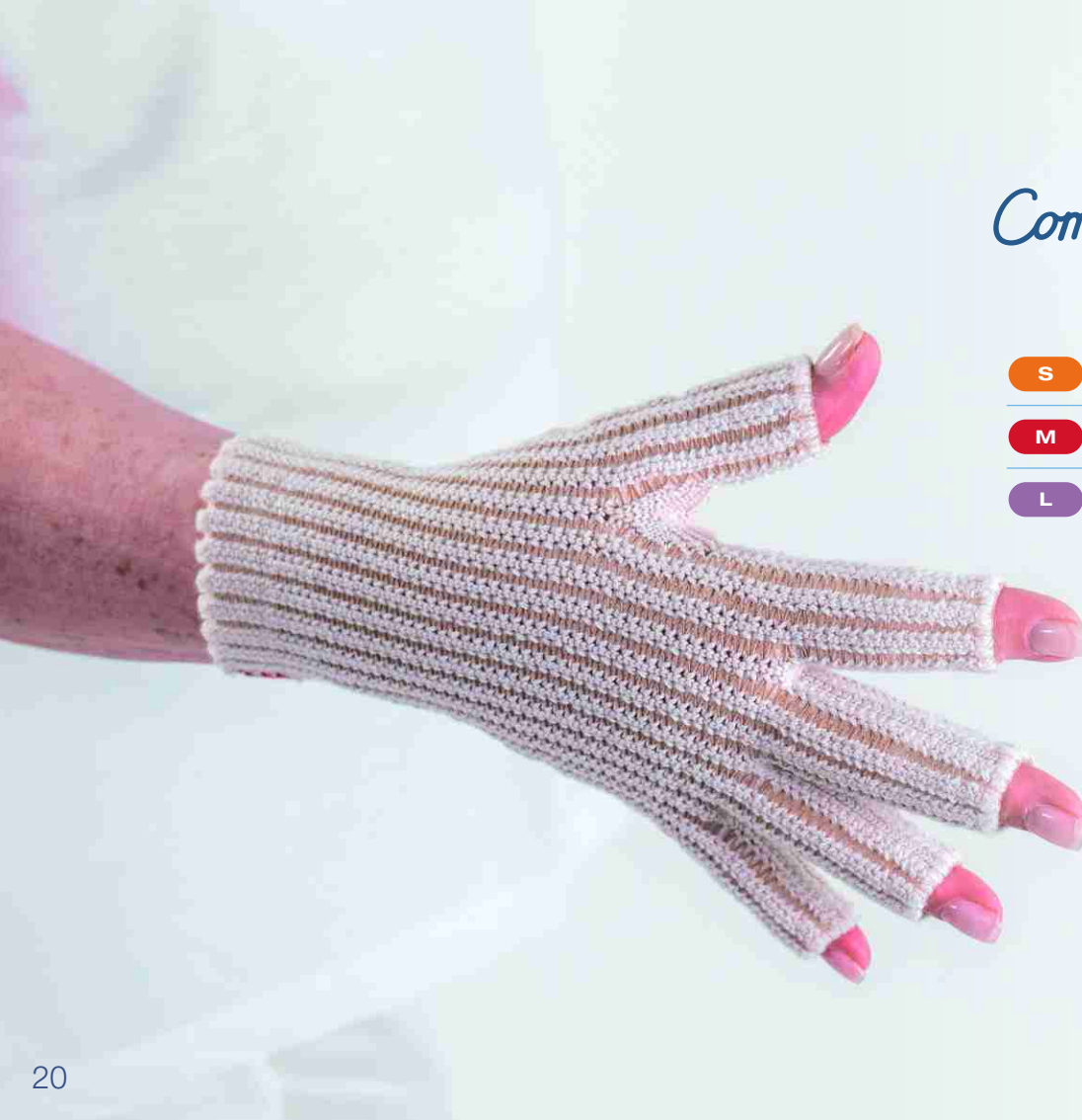

Comfiwave® Handske

NORMAL

S

CW1-ZC2



M


CW1-ZC3



L

CW1-ZC4



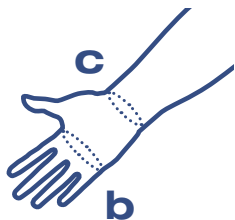

Omkreds cm

S

M

L

b OMKREDS AF HÅND VED
FINGRENE'S GRUNDLED

17 - 22

20 - 25

23 - 28

c HÅNDLED

14 - 20

16 - 24

22 - 28



b

Omkreds af hånd ved
fingrenes grundled



c

Håndled



Comfiwave®

Lang handske med fingre

NORMAL

S

CW1-ZE2



M


CW1-ZE3



L

CW1-ZE4



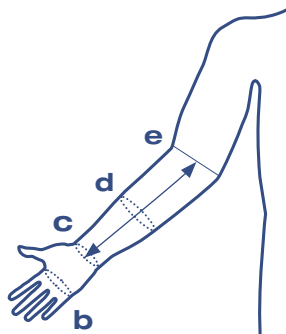

Omkreds cm

b OMKREDS AF HÅND VED FINGRENS GRUNDLED

S

17 - 22

M

20 - 25

L

23 - 28

c HÅNDLED

14 - 20

16 - 24

22 - 28

d MIDT PÅ UNDERARMEN

23 - 28

26 - 32

30 - 38

Længde cm

NORMAL

c-e HÅNDLED TIL ALBUE

20 - 24



b

Omkreds af hånd ved fingrenes grundled



c

Håndled



d

Midt på underarm



c-e

Håndled til albuebøjning



Comfiwave®

Arm/handske med fingre

KORT

NORMAL

S

CW1-ZH2S

CW1-ZH2R

M


CW1-ZH3S

CW1-ZH3R

L

CW1-ZH4S

CW1-ZH4R

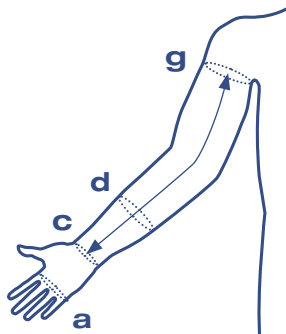

Omkreds cm

S

M

L

g ARMHULE

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d MIDT PÅ UNDERARM

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c HÅNDELED

13 - 18

18 - 22

22 - 28

a OMKREDS AF HÅND VED
FINGRENS GRUNDLED

16 - 22

18 - 24

20 - 26

Længde cm

KORT

NORMAL

c-g ARMSTRØMPE MED
HÅNDEL

36 - 42

40 - 46



b

Omkreds af hånd ved
fingrenes grundled



c

Håndled



d

Midt på underarm



c-e

Håndled til
albuebøjning




Comfiwave® Mavebånd

M	CW1-HT3	■ ■ ■
L	CW1-HT4	■ ■ ■
XL	CW1-HT5	■ ■ ■



Comfiwave® Lår med hofte

	KORT		NORMAL	
S	CW1-ET2S	■ ■	CW1-ET2R	■ ■ ■
M	CW1-ET3S	■ ■ ■	CW1-ET3R	■ ■ ■
L	CW1-ET4S	■ ■ ■	CW1-ET4R	■ ■ ■
XL	CW1-ET5S	■ ■ ■	CW1-ET5R	■ ■ ■

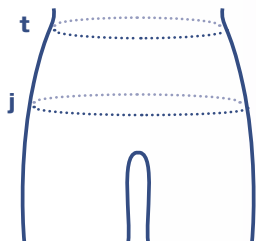

Omkreds cm

t TALJE

j HOFTER

M

60 - 75


L

70 - 85

XL

90 - 120

110 - 140

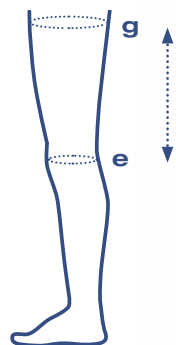

Omkreds cm

g TOPPEN AF
LÅRET

e KNÆ

S

40 - 48

M

46 - 56

L

54 - 65

XL

62 - 75

41 - 50

48 - 60

KORT

NORMAL

e-g LÅRSTYKKE


20 - 26

25 - 31



Comfiwave® Brystbånd

S	CW1-TN2	
M	CW1-TN3	
L	CW1-TN4	
XL	CW1-TN5	

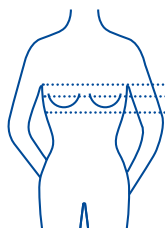

Omkreds cm

OVER BRYST

PÅ BRYST

UNDER BRYST

S

M

L

XL

70 - 88

80 - 102

90 - 116

100 - 130

70 - 92

80 - 108

90 - 126

100 - 144

70 - 80

80 - 92

90 - 104

100 - 116




Over bryst



På bryst



Under bryst

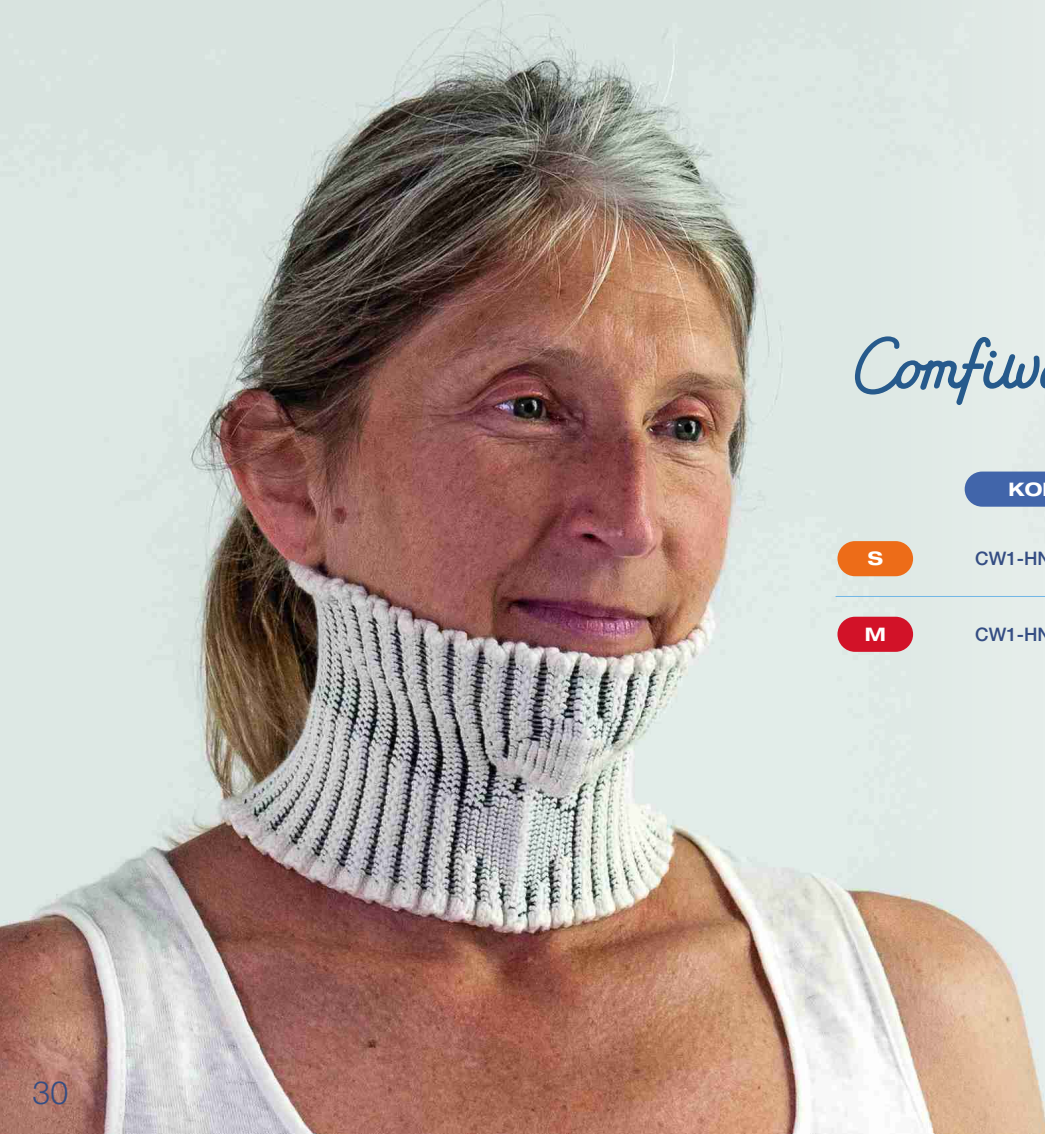

Comfiwave® Halsbandage

KORT

NORMAL

S


CW1-HN2S

CW1-HN2R

M

CW1-HN3S

CW1-HN3R

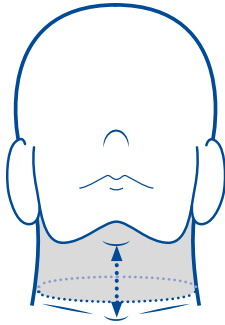

OMKREDS AF HALS OVER
KRAVEBEN

S

32 - 38

M

37 - 43

KORT

5-7

NORMAL

7-9

LÆNGDE AF HALS



Omkreds af hals
over kraveben



Længde af hals

Dansk distributør:

Specialbandager.dk A / S

Bindeledet 10
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon: 4444 8850

E-mail: info@specialbandager.dk

www.specialbandager.dk

Comfiwave[®]

Haddenham Healthcare Ltd
4D Drakes Drive
LANG Crendon, HP18 9BA
United Kingdom



www.comfiwave.info



01844 208842



sales@hadhealth.com